


PRODUKTKATALOG

Inspire your eyes
mark'enny

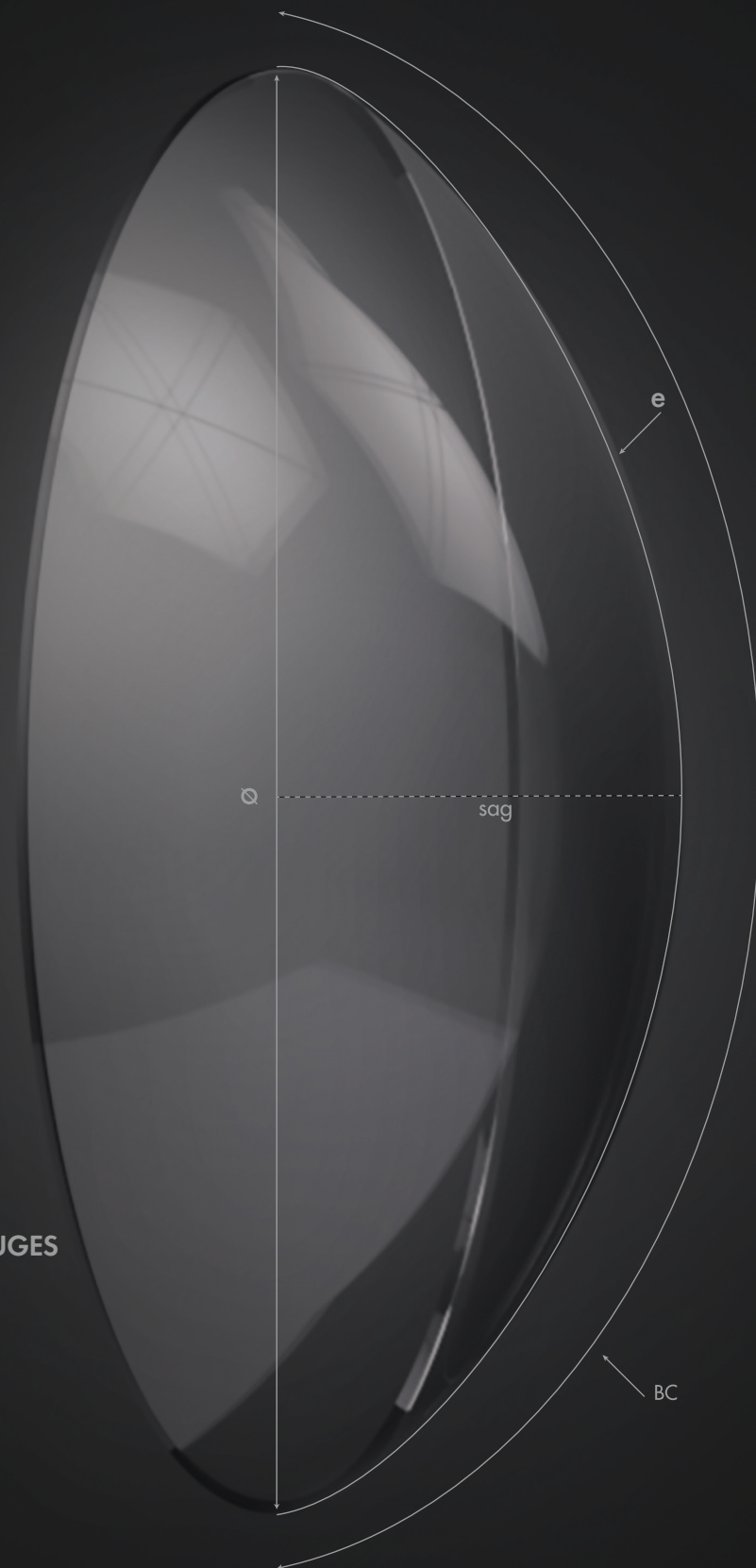

INDIVIDUELLE CONTACTLINSEN FÜR DIE EINZIGARTIGKEIT JEDES AUGES

- 241 SPHÄREN
- 180 ACHSEN
- 30 ZYLINDER
- 15 ADDITIONEN
- 11 DURCHMESSER
- 4 GEOMETRIEN
- 4 EIGENE MATERIALIEN

Wenden Sie sich an Ihren Regionalverkaufsleiter, um die besten Möglichkeiten zu besprechen, wie Sie die Anzahl der mark'enny Contactlinsenträger steigern können.

INDIVIDUELL GEFERTIGTE CONTACTLINSEN FÜR DIE EINZIGARTIGKEIT JEDES AUGES

INDIVIDUELLE WEICHE CONTACTLINSEN (MONATLICHER TAUSCH)

Blu:gen | monatlich



Individuelle Contactlinse | 3 & 6-Pack

Blu:gen ist eine Silikon-Hydrogel-Linse, die einen erste Klasse UV-Schutz mit einem selektiven Blaulichtfilter kombiniert. Das Auge erfährt einen umfassenden Schutz vor 99% UVB, 93% UVA-Strahlung und 14% im Bereich des schädlichen blau-violetten Lichtspektrums. Der hohe Wassergehalt, geringe Dehydrierung kombiniert mit dem geringsten Modulus (0,25 MPa) aller auf dem Markt erhältlichen Silikonhydrogele.

Silikonhydrogel (75% H₂O)
Blaulicht Filter
UV-Filter der Klasse 1

| | |
|---------------|---------|
| Dk | 60 |
| MPa | 0,25 |
| Handlingstint | Ja |
| Dehydrierung | < 0,50% |

| | |
|---------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Sphärisch | <input type="radio"/> Multifokal |
| <input type="radio"/> Torisch | <input type="radio"/> Multifokal Torisch |

| | |
|-------|------------------------------|
| BC | 6,50 bis 9,80 (0,30) |
| Ø | 11,50 bis 16,50 (0,50) |
| SPH | ±30,00 (0,25) |
| ZYL | -0,75 bis -8,00 (0,25) |
| ACHSE | Alle (1°) |
| ADD | 0,50 bis 4,00 (0,25) CD - CN |

Saphir RX | monatlich



Individuelle Contactlinse | 3 & 6-Pack

Saphir RX ist eine Silikonhydrogel-Linse, die einen hohen Wassergehalt aufweist. Eine geringe Dehydrierung, die sehr gleitfähige Oberfläche (CoF = 0,09) plus das neue Randdesign sorgen für höchsten Tragekomfort. Dies gewährleistet gleichzeitig eine hohe Bildqualität und einfache Handhabung während des gesamten Lebenszyklus der Linse.

Silikonhydrogel (75% H₂O)

| | |
|---------------|------|
| Dk | 60 |
| MPa | 0,29 |
| Handlingstint | Nein |
| Dehydrierung | 1% |

| | |
|---------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Sphärisch | <input type="radio"/> Multifokal |
| <input type="radio"/> Torisch | <input type="radio"/> Multifokal Torisch |

| | |
|-------|------------------------------|
| BC | 6,80 bis 9,80 (0,30) |
| Ø | 13,00 bis 16,00 (0,50) |
| SPH | ±30,00 (0,25) |
| ZYL | -0,75 bis -8,00 (0,25) |
| ACHSE | Alle (1°) |
| ADD | 0,50 bis 4,00 (0,50) CD - CN |

Gentle 80 | monatlich



Individuelle Contactlinse | 3 & 6-Pack

Gentle 80 ist eine biomimetische Hydrogellinse, die die natürlichen Eigenschaften der Hornhaut imitiert. Der geringe Modulus (0,13MPa) und ein hoher DK von 60 garantieren einen einzigartigen Tragekomfort, sehr gute Benetzung und Gesundheit der Augen.

Ori:gen Technology (80% H₂O)
UV-Schutz

| | |
|---------------|---------|
| Dk | 60 |
| MPa | 0,13 |
| Handlingstint | Ja |
| Dehydrierung | < 0,50% |

| | |
|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Asphärisch | <input type="radio"/> Multifokal |
| <input type="radio"/> Torisch | <input type="radio"/> Multifokal Torisch |

| | |
|-------|------------------------------|
| BC | 7,10 bis 9,80 (0,30) |
| Ø | 13,00 bis 16,00 (0,50) |
| SPH | ±30,00 (0,25) |
| ZYL | -0,75 bis -8,00 (0,25) |
| ACHSE | Alle (1°) |
| ADD | 0,50 bis 4,00 (0,50) CD - CN |

INDIVIDUELL GEFERTIGT

Unsere individuell gefertigten weichen Linsen bieten Ihnen die größte Auswahl an Optionen

241

Sphären

180

Achsen

30

Zylinder

15

Additionen

12

Basiskurven

11

Durchmesser

4

Geometrien

4

Eigene Materialien

Inspire your eyes

markennövy

Gentle 59 | monatlich



Individuelle Contactlinse | 3 & 6-Pack

Gentle 59 ist eine biomeimetische Hydrogel-Contactlinse die die natürlichen Eigenschaften der Hornhaut nachahmt. Sie kombiniert einen hohe Oberflächengleitfähigkeit (CoF = 0,05) mit geringer Dehydrierung (<1%) und sorgt für einen exzellenten Komfort. Ein Modulus von 0,36 MPa ermöglicht eine optimale Handhabung und Stabilisierung. Der geringe Wassergehalt von 59% ist für schwierige Tränenfilmbedingungen sehr gut geeignet und erzielt eine hohe Sehqualität.

Ori:gen Technology (59% H₂O)
UV-Schutz

| | |
|---------------|------------------------------|
| Dk | 30 |
| MPa | 0,36 |
| Handlingstint | Ja |
| Dehydrierung | < 1% |
| ☉ Sphärisch | ☉ Multifokal |
| ○ Torisch | ☉ Multifokal Torisch |
| BC | 7,10 bis 9,80 (0,30) |
| Ø | 13,00 bis 16,00 (0,50) |
| SPH | ±30,00 (0,25) |
| ZYL | -0,75 bis -8,00 (0,25) |
| ACHSE | Alle (1°) |
| ADD | 0,50 bis 4,00 (0,50) CD - CN |

Blu:kidz | monatlich



Individuelle Contactlinse | 3 & 6-Pack

Blu:kidz ist eine Silikon-Hydrogel-Linse, die einen UV-Filter der Klasse 1 mit selektiver Blaulicht-Filter kombiniert, um das Auge vor 99% UVB, 93% UVA und 14% schädlichem blau-violettem Licht zu schützen. Die kindgerechten Durchmesseroptionen ermöglichen die Anpassung auch für die Kleinsten. Der grüne Handlingstint und der hohe Wassergehalt, wie die geringe Dehydrierung des Materials sorgen für verbessertes Handling und perfekten Komfort für Erstcontactlinsenträger.

Silikonhydrogel (75% H₂O)
Blaulicht Filter
UV-Filter der Klasse 1

| | |
|---------------|------------------------------|
| Dk | 60 |
| MPa | 0,25 |
| Handlingstint | Ja |
| Dehydrierung | < 0,50% |
| ☉ Sphärisch | ☉ Multifokal |
| ○ Torisch | ☉ Multifokal Torisch |
| BC | 6,50 bis 9,80 (0,30) |
| Ø | 11,50 bis 16,50 (0,50) |
| SPH | ±30,00 (0,25) |
| ZYL | -0,75 bis -8,00 (0,25) |
| ACHSE | Alle (1°) |
| ADD | 0,50 bis 4,00 (0,25) CD - CN |

Sammeln Sie die notwendigen biometrischen Daten

- Brillenrefraktion (aktuell)
- Dominantes Auge
- Sichtbarer Hornhautdurchmesser
- Exzentrizität
- Hornhautradien



Benötigen Sie Unterstützung bei der Anpassung ?

Sprechen Sie mit einem unserer Experten:

Gratis-Hotline 0800 4474476

Anpassregel für Blu:gen, Blu:kidz

Linse Ø: Fügen Sie 3mm zum sichtb. HH-Durchmesser hinzu
BC: Km = (K1 + K2)/2

| LØ (mm) | BC (mm) | Km=(K1 + K2)/2 |
|-------------|-------------|----------------|
| 11,50/12,00 | 6,50 - 8,30 | Km +0,0 |
| 12,00 | 6,50 - 8,60 | Km +0,0 |
| 13,00 | 6,50 - 8,90 | Km +0,0 |
| 13,50 | 6,80 - 9,20 | Km +0,1 |
| 14,00 | 7,10 - 9,50 | Km +0,4 |
| 14,50 | 7,40 - 9,80 | Km +0,5 |
| 15,00 | 7,70 - 9,80 | Km +0,7 |
| 15,50 | 8,00 - 9,80 | Km +0,9 |
| 16,00 | 8,30 - 9,80 | Km +1,1 |
| 16,50 | 8,60 - 9,80 | Km +1,3 |
| 16,50 | 8,60 - 9,80 | Km +1,3 |

Anpassungsregel für Gentle 80

Linse Ø: Fügen Sie 3mm zum sichtb. HH-Durchmesser hinzu
BC: Km = (K1 + K2)/2

| LØ (mm) | BC (mm) | Km=(K1 + K2)/2 |
|---------|-------------|----------------|
| 13,00 | 7,10 - 8,90 | Km +0,0 |
| 13,50 | 7,10 - 9,20 | Km +0,0 |
| 14,00 | 7,40 - 9,50 | Km +0,1 |
| 14,50 | 7,70 - 9,80 | Km +0,3 |
| 15,00 | 8,00 - 9,80 | Km +0,5 |
| 15,50 | 8,30 - 9,80 | Km +0,7 |
| 16,00 | 8,60 - 9,80 | Km +0,9 |

Anpassregel für Saphir RX

Linse Ø: Fügen Sie 3mm zum sichtb. HH-Durchmesser hinzu
BC: Km = (K1 + K2)/2

| LØ (mm) | BC (mm) | Km=(K1 + K2)/2 |
|---------|-------------|----------------|
| 13,00 | 6,50 - 8,90 | Km +0,0 |
| 13,50 | 7,10 - 9,20 | Km +0,1 |
| 14,00 | 7,40 - 9,50 | Km +0,3 |
| 14,50 | 7,70 - 9,80 | Km +0,5 |
| 15,00 | 8,00 - 9,80 | Km +0,7 |
| 15,50 | 8,30 - 9,80 | Km +0,9 |
| 16,00 | 8,60 - 9,80 | Km +1,1 |

Wir von mark'envoy heben uns von dem Status Quo der Industrie durch unsere Innovationen, Technologien und einem Team von hochqualifizierten Spezialisten ab. Der Kunde, wie auch der Contactlinsenanpasser sind ein Richtwert bei allem was wir tun. Wir möchten Sie bei jedem einzelnen Schritt Ihrer Contactlinsen-Reise begleiten; von der ersten Beratung bis hin zur finalen Abgabe der Contactlinse..

Unsere Contactlinsen produzieren wir sorgfältig und individuell nach den spezifischen Messergebnissen des Anpassers und der Einzigartigkeit. Unsere fortschrittlichen Materialien, Optiken und Technologien geben Ihnen als Anpasser die Möglichkeit, jedem Kunden ein gesundes, einzigartiges Seh- und Trageerlebnis zu bieten.

Schließlich glauben wir bei mark'envoy:
besser Sehen bedeutet auch besser Leben!

Inspire your eyes
mark'envoy

KONTAKTIEREN SIE UNSER CUSTOMER CARE TEAM

T. 0800 44 74 476 | F. 0800 55 15 516

INTERNATIONAL: T +34 91 634 30 43 | F. +34 916390018


E. order@markenvoy.com

www.markenvoy.com



EXKLUSIVER FOCUS AUF DEN CONTACTLINSENSPEZIALIST

Wir verkaufen ausschließlich durch den Contactlinsenspezialisten

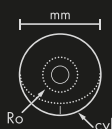

MASSGESCHNEIDERTE WEICHE LINSEN

Wir bieten eine außergewöhnliche KOMBINATION an Parametern, Geometrien und MATERIALIEN NEUESTER GENERATION um nahezu jeden Sehbedarf zu korrigieren.



TECHNISCHE EXPERTISE

Wir glauben an den Mehrwert unseres Customer Care Teams bestehend aus OPTIKERN.



SCHNELLE LIEFERZEITEN

Wir PRODUZIEREN IN NUR 72 STUNDEN, dies bedeutet, dass Sie die massgefertigten Linsen INNERHALB VON 4-5 ARBEITSTAGEN NACH BESTELLUNG ERHALTEN



INDIVIDUALLY YOURS

Jede Contactlinse wird sorgfältig geprüft und in die finale Verpackung mit dem Namen Ihres Kunden platziert