


# CATALOGO PRODOTTI

Inspire your eyes  
**mark'envoy**

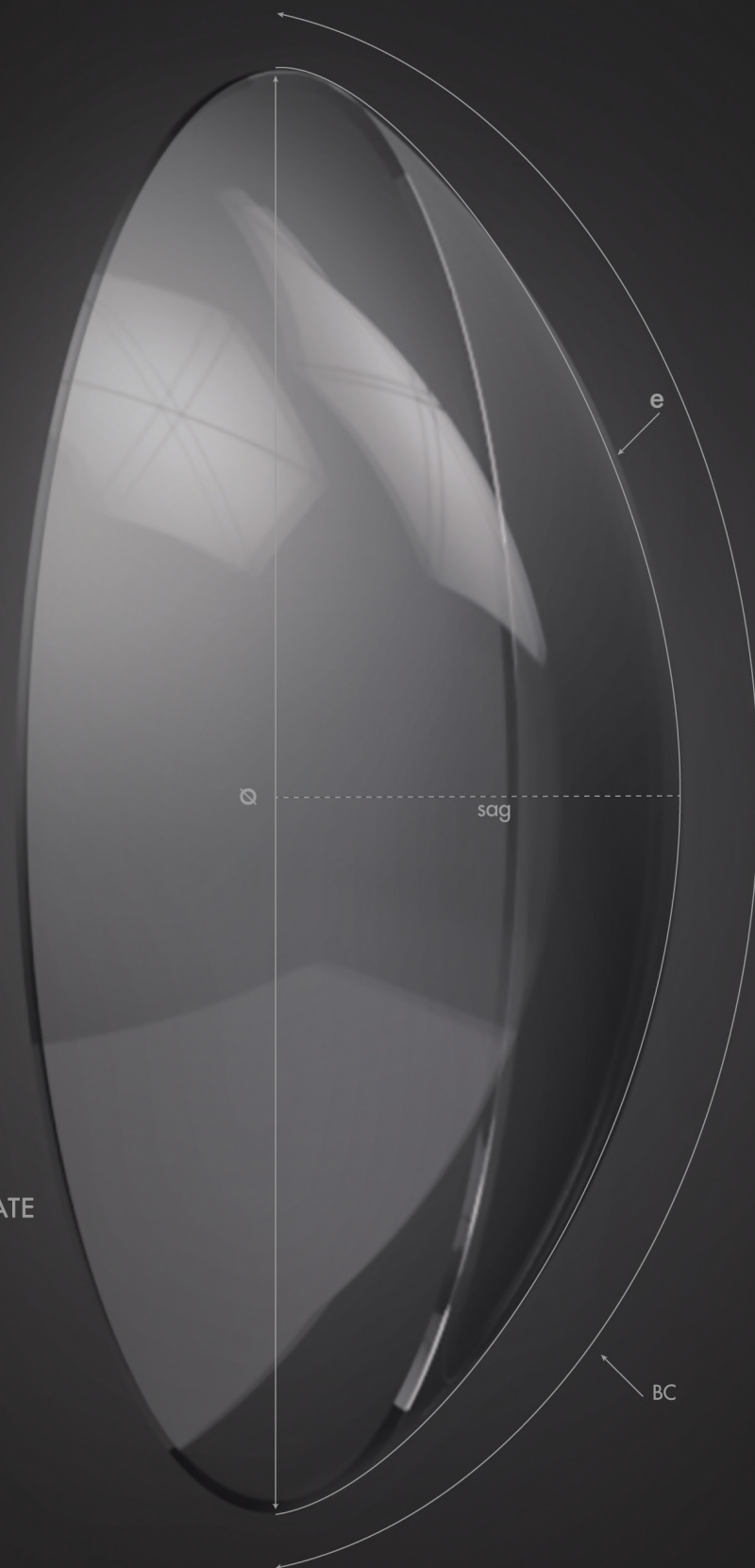

## LENTI A CONTATTO PERSONALIZZATE PER L'UNICITA' DI OGNI OCCHIO

- 241 SFERE
- 180 ASSI
- 30 CILINDRI
- 15 ADDIZIONI
- 11 DIAMETRI
- 4 GEOMETRIE
- MATERIALI DI PROPRIETA'

Contatti il suo Business Development Manager per discutere assieme a lui le migliori opzioni per aumentare il numero di portatori ai quali applicare le lenti mark'envoy

# LENTI A CONTATTO PRODOTTE INDIVIDUALMENTE PER LE CARATTERISTICHE UNICHE DI OGNI SINGOLO OCCHIO

## LENTI A CONTATTO MORBIDE MENSILI

### Blu:gen | Mensile



Lenti a contatto morbide personalizzate 3 & 6 pack

**Blu:gen** è una lente a contatto mensile in Silicone Hydrogel che combina un filtro UV di classe 1 al Selective Blue blocking filter per proteggere l'occhio dal 99% della radiazioni UVB, dal 93% di quelle UVA e dal 14% della radiazione Blu Violetta. Il suo alto contenuto d'acqua, il materiale a bassa disidratazione e uno fra i più bassi moduli di elasticità delle lenti in Silicone Hydrogel del mercato (0.25 MPa) offrono al portatore un'esperienza di utilizzo confortevole per tutto l'arco della giornata.

**Silicone Hydrogel (75% H<sub>2</sub>O)**  
**Selective Blue Blocking Filter**  
**Filtro UV Classe 1**

Dk	60
MPa	0.25
Tinta di visibilità	Si
Disidratazione	< 0.50%
☉ Sferica	☉ Multifocale
○ Torica	☉ Multifocale Torica
CB	6.50 a 9.80 (0.30)
Ø	11.50 a 16.50 (0.50)
SFE	±30.00 (0.25)
CIL	-0.75 a -8.00 (0.25)
ASSI	Tutti intervallo di (1°)
ADD	0.50 a 4.00 (0.25) CD - CN

### Saphir Rx | Mensile



Lenti a contatto morbide personalizzate 3 & 6 pack

**Saphir Rx** è una lente a contatto mensile in Silicone Hydrogel, confortevole con un materiale ad alto contenuto d'acqua, bassa disidratazione e una superficie molto liscia (CoF = 0.09). Il suo basso modulo (0.29 MPa) aumenta il comfort della lente assicurando al contempo qualità della visione, facile manipolazione per tutto il ciclo di vita della lente

**Silicone Hydrogel (75% H<sub>2</sub>O)**

Dk	60
MPa	0.29
Tinta di visibilità	No
Disidratazione	1%
☉ Sferica	☉ Multifocale
○ Torica	☉ Multifocale Torica
CB	6.80 a 9.80 (0.30)
Ø	13.00 a 16.00 (0.50)
SFE	±30.00 (0.25)
CIL	-0.75 a -8.00 (0.25)
ASSI	Tutti intervallo di (1°)
ADD	0.50 a 4.00 (0.50) CD - CN

### Gentle 80 | Mensile



Lenti a contatto morbide personalizzate 3 & 6 pack

**Gentle 80** è una lente a contatto bio-ispirata in Hydrogel, disegnata per imitare le proprietà naturali della cornea. Il suo materiale combina un alto contenuto d'acqua, bassa disidratazione ed il più basso modulo di elasticità del mercato (0.13 MPa) con una trasmissibilità all'ossigeno che raggiunge i livelli del Silicone Hydrogel (Dk = 60) e l'ha portata a ricevere un importante premio per il comfort e la salute oculare.

**Ori:gen Technology (80% H<sub>2</sub>O)**  
**Filtro UV**

Dk	60
MPa	0.13
Tinta di visibilità	Si
Disidratazione	< 0.50%
☉ Asferica	☉ Multifocale
○ Torica	☉ Multifocale Torica
CB	7.10 a 9.80 (0.30)
Ø	13.00 a 16.00 (0.50)
SFE	±30.00 (0.25)
CIL	-0.75 a -8.00 (0.25)
ASSI	Tutti intervallo di (1°)
ADD	0.50 a 4.00 (0.50) CD - CN

INDIVIDUALLY CRAFTED

Le nostre lenti a contatto morbide mensili personalizzate offrono un ampio range di opzioni

241

180

30

15

12

11

4

4

Sfere

Assi

Cilindri

Addizioni

Curve base

Diametri

Geometrie

Materiali di proprietà

Inspire your eyes

**markennovy**

## LENTI A CONTATTO MORBIDE MENSILI

### Gentle 59 | Mensile



Lenti a contatto morbide personalizzate 3 & 6 pack

**Gentle 59** è una lente a contatto bio-ispirata in Hydrogel, disegnata per imitare le proprietà naturali della cornea.

Combina un'alta lubricità di superficie (Cof 0.05) ad una bassa disidratazione (< 1%) per un eccellente comfort. Il suo modulo di elasticità (0.36 Mpa) è stato attentamente calibrato per ottenere un'ottima manipolazione e qualità della visione durante il ciclo di vita della lente senza ridurre il comfort e la salute oculare.

Ori:gen Technology (59% H<sub>2</sub>O)  
Filtro UV

Dk	30
MPa	0.36
Tinta di visibilità	Sì
Disidratazione	< 1%
☉ Sferica	☉ Multifocale
○ Torica	☉ Multifocale Torica

CB 7.10 a 9.80 (0.30)  
 Ø 13.00 a 16.00 (0.50)  
 SFE ±30.00 (0.25)  
 CIL -0.75 a -8.00 (0.25)  
 ASSI Tutti intervallo di (1°)  
 ADD 0.50 a 4.00 (0.50) CD - CN

### Blu:kidz | Mensile



Lenti a contatto morbide personalizzate 3 & 6 pack

**Blu:kidz** è una lente a contatto mensile in Silicone Hydrogel che combina un filtro UV di classe 1 al Selective Blue blocking filter per proteggere l'occhio dal 99% della radiazioni UVB, dal 93% di quelle UVA e dal 14% della radiazione Blu Violetta. Il suo range di diametri adatto ai bambini rende possibile l'applicazione anche su occhi piccoli mentre la sua tinta di visibilità verde, il suo alto contenuto d'acqua e la bassa disidratazione del materiale offrono una miglior facilità di manipolazione e comfort - perfette per una prima esperienza di utilizzo delle lenti a contatto.


Silicone Hydrogel (75% H<sub>2</sub>O)  
Selective Blue Blocking Filter  
Filtro UV Classe 1

Dk	60
MPa	0.25
Tinta di visibilità	Sì
Disidratazione	< 0.50%
☉ Sferica	☉ Multifocale
○ Torica	☉ Multifocale Torica

CB 6.50 a 9.80 (0.30)  
 Ø 11.50 a 16.50 (0.50)  
 SFE ±30.00 (0.25)  
 CIL -0.75 a -8.00 (0.25)  
 ASSI Tutti intervallo di (1°)  
 ADD 0.50 a 4.00 (0.25) CD - CN

### Raccogliere i dati biometrici necessari

- Prescrizione oculiale
- Dominanza oculare
- HVID Diametro orizzontale dell'iride visibile
- Letture cheratometriche (K corneali)

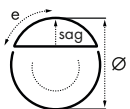

### Necessiti di una consulenza per l'applicazione?

Parla con uno dei nostri esperti chiamando il:

T. 800 719 481 | F.800 719 427  
 T.Int. +34 91 649 61 62 | E. ordini@markenovy.com  
 www.markenovy.it

### CALCOLARE LALENTE Ø E RB

#### Fitting Guide per la Gentle 80

Ø della lente: aggiungere 3 mm al diametro dell'iride visibile

RB:  $Km = (K1 + K2)/2$

DØ (mm)	RB (mm)	$Km=(K1 + K2)/2$
13.00	7.10 - 8.90	$Km + 0.0$
13.50	7.10 - 9.20	$Km + 0.0$
14.00	7.40 - 9.50	$Km + 0.1$
14.50	7.70 - 9.80	$Km + 0.3$
15.00	8.00 - 9.80	$Km + 0.5$
15.50	8.30 - 9.80	$Km + 0.7$
16.00	8.60 - 9.80	$Km + 0.9$

#### Fitting Guide per la Gentle 59

Ø della lente: aggiungere 3 mm al diametro dell'iride visibile

RB:  $Km = (K1 + K2)/2$

DØ (mm)	RB (mm)	$Km=(K1 + K2)/2$
13.00	7.10 - 8.90	$Km + 0.0$
13.50	7.10 - 9.20	$Km + 0.2$
14.00	7.40 - 9.50	$Km + 0.4$
14.50	7.70 - 9.80	$Km + 0.6$
15.00	8.00 - 9.80	$Km + 0.8$
15.50	8.30 - 9.80	$Km + 1.0$
16.00	8.60 - 9.80	$Km + 1.2$

#### Fitting Guide per la Saphir RX

Ø della lente: aggiungere 3 mm al diametro dell'iride visibile

RB:  $Km = (K1 + K2)/2$

DØ (mm)	RB (mm)	$Km=(K1 + K2)/2$
13.00	6.80 - 8.90	$Km + 0.0$
13.50	7.10 - 9.20	$Km + 0.1$
14.00	7.40 - 9.50	$Km + 0.3$
14.50	7.70 - 9.80	$Km + 0.5$
15.00	8.00 - 9.80	$Km + 0.7$
15.50	8.30 - 9.80	$Km + 0.9$
16.00	8.60 - 9.80	$Km + 1.1$

#### Fitting Guide per le Blu:gen y Blu:kidz

Ø della lente: aggiungere 3 mm al diametro dell'iride visibile

RB:  $Km = (K1 + K2)/2$

DØ (mm)	RB (mm)	$Km=(K1 + K2)/2$
11.50/12.00	6.50 - 8.30	$Km + 0.0$
12.50	6.50 - 8.60	$Km + 0.0$
13.00	6.50 - 8.90	$Km + 0.0$
13.50	6.80 - 9.20	$Km + 0.1$
14.00	7.10 - 9.50	$Km + 0.4$
14.50	7.40 - 9.80	$Km + 0.5$
15.00	7.70 - 9.80	$Km + 0.7$
15.50	8.00 - 9.80	$Km + 0.9$
16.00	8.30 - 9.80	$Km + 1.1$
16.50	8.60 - 9.80	$Km + 1.3$

In mark'ennovy abbiamo il coraggio di sfidare lo status quo della contattologia innovando grazie ad un team di professionisti che non teme confronti. Il portatore ed il professionista della visione sono il cuore di tutto ciò che facciamo.

Il nostro impegno è aggiungere valore ad ogni passaggio del processo di costruzione della lente, dal primo incontro con il portatore fino ad un'applicazione finale di successo.

Le lenti a contatto da noi prodotte sono create accuratamente e individualmente sulla base degli specifici parametri ed esigenze visive del portatore, secondo la valutazione determinata dal professionista della visione.

I nostri materiali di ultima generazione, le ottiche e la tecnologia ci permettono di assicurare una visione eccezionale, confortevole per tutto il giorno, salvaguardando la salute degli occhi dei portatori. Perché in mark'ennovy siamo convinti che vedere meglio è vivere meglio!

Inspire your eyes

**mark'ennovy**

CONTATTI IL NOSTRO CUSTOMER CARE TEAM:

T. 800 719 481 | F. 800 719 427

T. Int. +34 91 649 61 26


E. ordini@markennovy.com

www.markennovy.it



#### FOCALIZZATI ESCLUSIVAMENTE SU DI VOI

Vendiamo esclusivamente attraverso di Voi, professionisti della visione

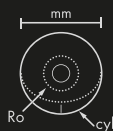

#### LENTI A CONTATTO MORBIDE PERSONALIZZATE

Offriamo una impareggiabile combinazione di parametri, geometrie e MATERIALI DI ULTIMA GENERAZIONE così da permettervi di applicare potenzialmente qualunque portatore



#### COMPETENZA TECNICA

Il nostro customer care è COMPOSTO DA OTTICI OPTOMETRISTI, perché riteniamo che questo tipo di supporto professionale sia un valore aggiunto per Voi



#### CONSEGNA RAPIDA

Di norma spediamo in solo 72 ore, il che significa avere le lenti a Vostra disposizione 4-5 giorni lavorativi dopo l'inserimento dell'ordine



#### INDIVIDUALLY YOURS

Ogni lente a contatto è controllata attentamente e posizionata nella confezione, con impresso il nome del vostro portatore