


INDIVIDUALLY CRAFTED


Onze individueel gemaakte zachte lenzen bieden u een brede range aan mogelijkheden

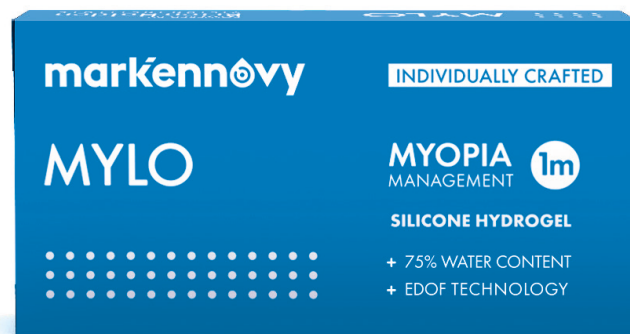

Mylo is een individueel gemaakte silicone hydrogel maandlens die speciaal is ontworpen voor Myopia Management. In samenwerking met het **Brien Holden Vision Institute** gepatenteerde **Extended Depth of Focus (EDOF)** technologie en de individueel gemaakte lens van markennovy, vertraagd deze comfortabele lens de bijziendheids progressie.

MYLO, de zachte maandlens, heeft een hoog watergehalte en lage wrijvingscoëfficiënt, die samen het comfort gedurende de dag verbeteren. Het brede scala aan parameters en de laag elastische modulus zorgen voor een uitstekende pasvorm en eenvoudige hanteerbaarheid, vooral voor jonge dragers van contactlenzen.

VERVANGING	Maandelijks	
VERPAKKING	3 & 6 lenzen	
GEOMETRIE	☉ Sferisch	
MATERIAAL KARAKTERISTIEKEN	Silicone Hydrogel	
	75% H ₂ O	
	Dk	60
	Dk/t	75
	MPa	0.29
	CoF	0.09
PARAMETERS	Ct	0.08
	BCR (mm)	7.10 to 9.80 (0.30)
	Ø (mm)	13.50 to 15.50 (0.50)
	SFE (D)	-0.25 to -15.00 (0.25)

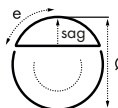

VOOR ADVIES KUNT U TERECHT BIJ EEN VAN ONZE EXPERTS

Klantenservice NL: 0800 023 2029
 Klantenservice BE: 0800 799 18
 Klantenservice@markennovy.com

STAP VOOR STAP AANPAS GIDS VOOR DEMYOPIA MANAGMENT LENS

Vergeet niet de onderstaande biometrische data van de klant te noteren:

- HVID
- Refractie (recent)
- K-waarden
- Excentriciteit

1. Bereken de lens:

om de diameter en sagitta en bcr te bepalen kunt u gebruik maken van de On-Line Calculator (<http://markennovy.com/nl/fitting-calculator/>)



2. Beoordeel de passing: controleer of de gekozen diameter en basiscurve een goede passing laat zien

3. Beoordeel de monoculaire en binoculaire afstand visus (VA):

monoculaire VA kan in lichte mate verschillen t.o.v een bril, niet meer dan 1 lijn. Binoculair zal de VA hoger zijn tegen of gelijk aan 20/20 (1.0)


a) Als de VA lager is dan 16/20 (0.8), negatieve over-refractie kan worden gegeven:-0.25D als dit een verhoging van 1 lijn in visus geeft

b) Is dit niet het geval, houdt dan dezelfde sterkte

OUR DIFFERENCE



Exclusief voor oogzorg professionals

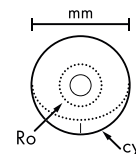


Ongevenaarde combinatie van parameters, geometriënen materialen



Ondersteuning van opticiens door Customer Care



Individually Yours

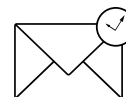

Snelle levering, paslenzen worden binnen 72 uur verstuurd

VOOR ADVIES KUNT U TERECHT BIJ EEN VAN ONZE EXPERTS

Klantenservice NL: 0800 023 2029

Klantenservice BE: 0800 799 18

Klantenservice@markennovy.com

Inspire your eyes

markennovy