

ENTRETIEN DES LENTILLES DE CONTACT

PEROXIDE SYSTEM



Notre système au peroxyde en une phase incorpore un indicateur de couleur jaune de vitamine B2. Notre produit désinfecte et neutralise en seulement une heure fournissant un nettoyage rapide et complet de tous les types de lentilles de contact souples et rigides, y compris celles en silicone hydrogel.

L'enrobage du comprimé de neutralisation se dissout progressivement durant une étape de désinfection de 12 minutes pour se transformer en solution saline sans conservateurs à la fin du processus de neutralisation.

FORMAT (60mL)	10
FORMAT (360mL)	20

COMPOSITION


Solution désinfectante: peroxyde d'hydrogène 3%.
Comprimés de neutralisation: chlorure de sodium, phosphate disodique, polyvinylpyrrolidone,
Vitamine B2, catalase 0,1 mg et excipient q.s.
Sans conservateurs.

BENEFITS

Désinfection optimale sans bulles
Action rapide
Élimine les protéines
Sans conservateurs
Contient un agent mouillant pour un port plus confortable
Avec des comprimés avec indicateur de couleur à la vitamine B2

PROCESSUS DE DÉSINFECTION ET DE NEUTRALISATION

Notre système au peroxyde désinfecte en 12 minutes et le processus complet (désinfection + neutralisation) se réalise en une heure seulement.

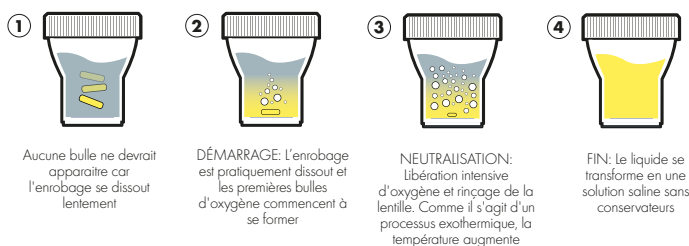

AUTRES INDICATIONS

Yeux sensibles ou normaux

Pour tous les porteurs de lentilles de contact (en silicone hydrogel, hydrogel, RGP et Ortho-K) ayant les yeux sensibles ou normaux. Si nécessaire, utilisez la solution saline pour rincer les lentilles avant l'insertion.

Yeux gras

Pour les porteurs de lentilles de contact traditionnelles en hydrogel, RGP et Ortho-K qui sont sujets aux yeux gras. L'entretien peut être complété avec un nettoyant à l'alcool isopropylique et une solution saline pour le rinçage.

Yeux secs

Pour les porteurs de lentilles RGP et Ortho-K ayant des problèmes de sécheresse oculaire. Le processus de nettoyage doit être complété par l'utilisation de gouttes hydratantes ou d'un spray oculaire contenant des liposomes.

CONTACTEZ VOTRE DÉLÉGUÉ COMMERCIAL POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Customer Care: T. 0800 91 52 73 F. 0800 91 53 90
International Customer Care: T. +34 916 496 124
E: mkservices@markennovy.com

markennovy